

Cupral®

Einzelne ausgezeichnet, zusammen unschlagbar!



die Kleine zum Probieren
5 g Paste



die große Ergiebige
15 g Paste



die Taschenspezialistin
1,8 g Paste



die praktische Spüllösung
100 ml



HUMANCHEMIE
Kompetenz in Forschung und Praxis

Humanchemie GmbH · Hinter dem Krüge 5 · DE-31061 Alfeld (Leine)
Telefon +49 (0) 51 81 - 2 46 33 · Telefax +49 (0) 51 81 - 8 12 26
E-Mail info@humanchemie.de · www.humanchemie.de

Cupral®

Bewährt in Endodontie und Parodontologie

- schnelle Ausheilung, auch ohne Antibiotika
- selektive Auflösung des Taschenepithels mit Membranbildung
- Keimreduktion mit Langzeitwirkung durch pH-Wert-Stabilisierung
- als Breitbandtherapeutikum ohne Resistenzbildung vielfach bewährt

Einfache Anwendung in der Praxis

Ein Fallbeispiel

Der 78-jährige Patient stellte sich mit Schmerzen beim Drücken gegen die Oberkiefer- und Unterkiefer-Front vor. Es lag eine Gingivitis vor, Sondierungstiefe von 8 mm. An den Unterkiefer-Frontzähnen hafteten Konkremete und die Gingiva löste sich beim Pusten in den Sulcus von den Zähnen. Die einleitende Therapie bestand in der Beseitigung der harten und weichen Beläge mit dem Desmoclean, dem Spülen mit Cupral liquid und dem anschließenden

Einlegen von Cupral-Baumwollfäden in die Zahnfleischtaschen.

Bei der Kontrolle nach knapp einer Woche (Abb. 1) waren die Beschwerden an den Oberkieferfrontzähnen verschwunden. Die Unterkiefer-Front war noch nicht beschwerdefrei. Am Zahn 31 bestand mesial eine Sondierungstiefe von 8 mm. Die tiefe Tasche am Zahn 31 wurde gereinigt, mit Cupral liquid gespült und

anschließend wurden in die Taschen Cupral-Fäden eingelegt.

Bei der Kontrolle nach 2 Tagen bestanden keine Beschwerden mehr. Die Taschentiefe am Zahn 31 betrug mesial 4 mm (Abb 2). Es erfolgte eine nochmalige Spülung mit Cupral liquid und in die Taschen wurden Cupral-Fäden eingelegt.

Eine Woche später betrug die Taschentiefe am Zahn 31 mesial 3 mm und die Gingiva zeigte eine physiologische Färbung (Abb. 3).



Abb. 1 - Ausgangsbefund im Frontzahnbereich: Gingivitis und Konkremete.



Abb. 2 - Taschentiefe mesial ca. 4 mm



Abb. 3 - Physiologische Färbung am Zahn 31, Taschentiefe mesial ca. 3 mm

Hiermit bestelle ich:

- ausführliches Informationsmaterial (kostenfrei) zu Produkten und Schulungen

Cupral® liquid

- Packungen Cupral® liquid
100 ml à EUR 20,00 netto statt EUR 25,50 netto

Cupral®

- Packungen Cupral® 5 g à EUR 16,00 netto statt EUR 21,00 netto
— Packungen Cupral® 15 g à EUR 33,00 netto statt 42,00 € netto
— Cupral® Spritzen 1,8 g à EUR 20,00 netto statt EUR 26,00 netto

Ralph Lehmann verwendet Cupral liquid zur wirkungsvollen Paro- und Endobehandlung

In unserer Praxis setzen wir das Cupral liquid zum Spülen von Wurzelkanälen und bei der Parodontitisbehandlung ein. Dabei steht mir als Zahnarzt ein wirkungsvolles und zudem CHX-freies Präparat zur Verfügung, das mir die schnelle Behandlung auch von akuten Prozessen ermöglicht.



Ich spüle mit Cupral liquid entweder einmalig oder auch mehrmals und sauge parallel ab. Je nach Indikation appliziere ich ggf. das Cupral als Paste entweder direkt (Wurzelkanal/kleine Tasche) oder auch mittels Retraktionsfaden (tiefe Taschen). Diesen belasse ich mindestens eine halbe Stunde in der Tasche, oftmals sogar über Nacht. Bei der Nachkontrolle am Folgetag entferne ich den Faden und appliziere das Cupral ggf. erneut bis der Prozess zum Ausheilen kommt. Selbst tiefe Taschen sind durch Spülung und Applikation mit wenigen Behandlungen erfolgreich zu therapieren – auch ohne Antibiotikagabe.

Dipl.-Stom. Ralph Lehmann,
Naumburg (Saale)

**Bestell-Fax an +49 (0) 51 81 - 8 12 26
bitte Praxisstempel einfügen**

Absender:

Datum/Unterschrift

Preise zzgl. MwSt., Porto- und Versandkosten. Es gelten die AGB der Humanchemie GmbH.
*alle Cupral®-Packungen bis 15.11.2019 günstiger.
Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.
Bei der Abwicklung über Ihren Großhändler sind wir Ihnen gern behilflich.



HUMANCHEMIE
Kompetenz in Forschung und Praxis

Humanchemie GmbH · Hinter dem Krüge 5 · DE-31061 Alfeld (Leine)
Telefon +49 (0) 51 81 - 2 46 33 · Telefax +49 (0) 51 81 - 8 12 26
E-Mail info@humanchemie.de · www.humanchemie.de