

Hersteller
Humanchemie GmbH

Verfahren:
Sterilisationsaufbereitung



Produkte: Depotporese®-Gerät Original II Steuergerät, Zubehörteil Kabelsatz
Steuergerät und Kabelsatz sind zur Wischdesinfektion bestimmt. Es kann z. B. mit Schnelldesinfektions-Spray FD 333 (www.duerrdental.com) mit einem Einmaltuch gereinigt und desinfiziert werden. Einwirkzeit 5 min (Kanten sorgfältig abwischen), Flächen vollständig benetzen, Angaben des Spray-Herstellers beachten.

WARNHINWEISE:	Steuergerät und Kabelsatz dürfen nicht dampfsterilisiert werden. Die Aufbereitung darf nur von hinreichend geschultem Personal ausgeführt werden.
Einschränkung der Wiederaufbereitung:	Die erwartete Produktlebensdauer umfasst 5 Jahre für Original II-Steuergeräte und 50 Aufbereitungsdurchläufe für Kabelsätze.

ANWEISUNGEN:	
Gebrauchsort:	Oberflächenverschmutzung mit einem Einmaltuch/Papiertuch entfernen.
Aufbewahrung und Transport:	Das Steuergerät wird üblicherweise nach dem Benutzen gereinigt.
1. Reinigungsvorbereitung:	Das Zubehör ist zur Reinigung vom Steuergerät zu trennen.
2. Reinigung	
manuell:	Ausstattung: Schnelldesinfektions-Spray Dürr FD 333 (www.duerrdental.com), Einwegtücher Verfahren: Einmaltuch mit FD 333 besprühen und gründlich abwischen, alle Anhaftungen entfernen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit 5 min (Angaben des Spray-Herstellers beachten). Schmutz mit einem trockenen Tuch abwischen.
3. Desinfektion	
manuell:	Ausstattung: Schnelldesinfektions-Spray Duerr FD 333 (www.duerrdental.com), Einwegtücher Verfahren: Einmaltuch mit FD 333 besprühen, Flächen vollständig benetzen, Einwirkzeit 5 min (Angaben des Spray-Herstellers beachten).
4. Trocknung	
manuell:	Mit Einmaltuch abwischen
5. Kontrolle und Funktionsprüfung:	Sichtprüfung auf Beschädigung und Verschleiß durchführen. Beschädigte Geräte und Kabelsätze nicht weiter verwenden.
8. Lagerung:	
Kontakt zum Hersteller:	Keine besonderen Anforderungen.
Kontakt zum Hersteller:	Humanchemie GmbH, Hinter dem Krüge 5, DE-31061 Alfeld (Leine), Deutschland, www.humanchemie.de Tel.: +49 (0) 5181/24633, Fax: +49 (0) 5181/81226 e-Mail: info@humanchemie.de

Die oben aufgeführten Anweisungen wurden vom Medizinproduktehersteller für die Aufbereitung eines Medizinprodukts zu dessen Wiederverwendung als GEEIGNET validiert. Dem Aufbereiter obliegt die Verantwortung, dass die tatsächlich durchgeführte Aufbereitung mit verwendeter Ausstattung, Materialien und Personal in der Aufbereitungseinrichtung die gewünschten Ergebnisse erzielt. Dafür sind normalerweise Validierung und Routineüberwachung des Verfahrens erforderlich. Ebenso sollte jede Abweichung von den bereitgestellten Anweisungen durch den Aufbereiter sorgfältig auf ihre Wirksamkeit und möglichen nachteiligen Folgen ausgewertet werden.

Dieses Dokument ist Teil der Gebrauchsanweisung für das Depotporese®-Gerät Original II.